



## Ambu<sup>®</sup> aScope<sup>™</sup>

Einweg - Viele Möglichkeiten



Das Ambu® aScope™ bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es ist weltweit das erste flexibel einsetzbare Einwegendoskop, welches Ambu für die Sicherung des Atemwegs entwickelt hat. Die Eigenschaften des aScope™ sind speziell auf die Bedürfnisse der Anästhesisten bei der Intubation eines schwierigen Atemwegs zugeschnitten. Dadurch werden mit dem Ambu® aScope™ völlig neue Möglichkeiten eröffnet und neue Maßstäbe im Bereich der Einwegprodukte gesetzt.



aScope™



## Leichte Anwendung

Die intuitive Bedienung und der leichte, ergonomisch geformte Handgriff erhöhen den Komfort bei der Intubation deutlich. Da das aScope™ wie eine herkömmliche flexible Optik zu bedienen ist, müssen Sie keine neuen Intubationstechniken erlernen. Über den Hebel am Handgriff lässt sich das distale Ende in beide Richtungen um 120° abwinkeln

Dies ermöglicht eine optimale Orientierung während der Intubation.


Um z. B. eine nasale Wachintubation angenehmer für den Patienten zu gestalten, kann, während der Intubation, über einen Arbeitskanal ein Lokalanästhetikum verabreicht werden.

Der Monitor verfügt über einen integrierten Akku, wodurch das aScope™ und der Monitor mobil im Krankenhaus transportiert werden können. Auf dem Bildschirm zeigt ein Symbol den Ladezustand des Akkus an.

## Minimales Risiko für Kreuzinfektion

Das aScope™ als Einwegprodukt minimiert das Risiko für Kreuzinfektionen. Damit wird die größtmögliche Sicherheit für den Patienten, aber auch für den Anwender erreicht. Bei der Aufbereitung von Mehrwegendoskopen werden nicht immer alle Keime entfernt; dieses Problem tritt beim aScope™ nicht auf.

Da sich in der Umgebungsluft viele Keime befinden, die das ausgepackte aScope™ kontaminieren können, verfügt es über einen integrierten Timer. Dieser wird mit dem ersten Einschalten aktiviert - zur Sicherheit für Ihre Patienten. Die gesamte Betriebszeit beträgt 30 Minuten in einem Zeitraum von 8 Stunden.

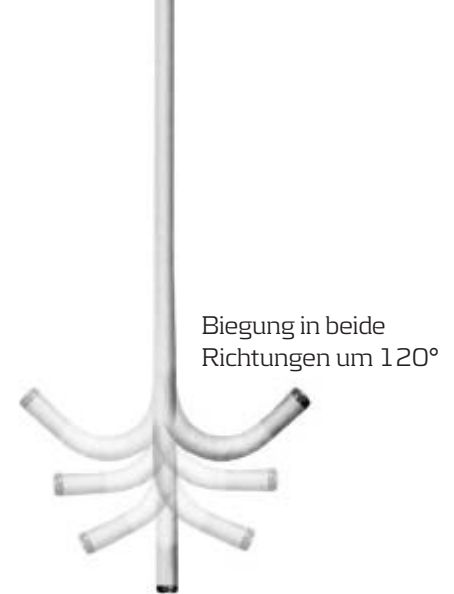



## Stets bereit für das Unerwartete!

Mit dem aScope™ können Sie stressfrei intubieren. Es ist kein manueller Weißabgleich notwendig. Das aScope™ einfach mit dem Monitor verbinden und Sie können gleich mit der Intubation beginnen.

Es ist sofort zur Anwendung bereit. Die internen Krankenhausabläufe werden optimiert. Dank der geringen Anschaffungskosten für das aScope™, kann es jederzeit vorgehalten werden. So sind Sie jederzeit bereit - auch in unerwarteten Situationen.

aScope™ und aScope™ Monitor

## Keine Aufbereitung, keine Reparaturen

Mit dem aScope™ arbeiten Sie besonders kosteneffizient. Keine teuren Reparaturen. Keine Aufbereitung. Im flexiblen Teil des aScope™ sind keine Glasfaserkabel vorhanden, somit ist das Gerät unempfindlich gegen Knickung und Biegung.

Die Bildübertragung wird über eine Kamera am distalen Ende realisiert. Für das notwendige Licht sorgen zwei Leuchtdioden. Das distale Ende erreicht dabei eine Temperatur von maximal 39°C.

Wenn Sie mehr zum aScope™ erfahren möchten, dann besuchen Sie uns auf [www.synmedic.ch](http://www.synmedic.ch)



aScope™ Monitor

# Synmedic AG

Gerhardstrasse 1 8036 Zürich Tel. 044 454 60 40 Fax. 044 454 60 41 E-Mail. [info@synmedic.ch](mailto:info@synmedic.ch) [www.synmedic.ch](http://www.synmedic.ch)

---

**Ambu** 

**Synmedic AG**

Gerhardstrasse 1

8003 Zürich

Tel. 044 454 60 40

Fax 044 454 60 41

[www.synmedic.ch](http://www.synmedic.ch)

AIRWAY MANAGEMENT

